





# 无线掌上彩超成像诊断系统

Android 软件安装及连接

版本: V1.0

日期: 2021.5.11



- 一、软件安装
- 1、用浏览器扫描二维码下载软件

		€	Ú.	$\heartsuit$	ୢ	¥			
没有:	SIM卡D含							12 -	4:36
$\leftarrow$	$\rightarrow$ O	合 搜	索或输入网	列址			8	+	:
	人民网	新华网	央视网		同信网	中国网		光明网	
	-					_		_	
	58	1	Â		爱淘宝			2	
	58同城	京东	安居奢		爱淘宝	华为阅读	卖	视频	
	A	-				S	1	00	
	华刀周城	愣程	应用市	加	58招聘	援狐		史多	

2、勾选"不再提示",点击"允许",再点击下面的"继续安装"



# 湖南润泽医疗影像科技有限公司



## Hunan Ramzed Medical Imaging Technology Co;Ltd.

3、允许权限, 点击"继续"

	允许Ramzed访问的权限	
新权刚	RY .	
	存储	
0	相机	
Ŷ	麦克风	
0	位置信息	始终允许 >



## 4、点击"继续安装"并等待软件安装

Ramzed	
又衣木原:问见帝	ÿ
🤑 发现风险项	
签名不一款,该应用可能已被修改。选择"继续安装"表示您愿意承担由此带来 的风险。	
全部权限 9 ~	
	•
	5
	Ş
取消继续安装	



5、点击"完成"则完成软件的安装。

没有 SIM 卡D 完	2、 📖 4:36
N P	
Damasd	
安装来源:浏览器	
A BOLOGO COLORAD	
▲ 空茶成功	
¥ \$2800.40	
完成 打开	

- 二、掌超设备 WiFi 连接
- 1、打开手机 WLAN 列表找到机器背面 WD 开头的序列号点击连接,密码是:12345678

没有 SIM 卡D 完		X 💷 4:38
	WLAN	
设置	WLAN 点击查看 <del>帮助</del>	
Q 搜索设置项	更多 WLAN 设置	>
188******11•   华为帐号、付款与 >   账单、云空间等	可用 WLAN 列表 rz04 已连接 (网络质量好)	ঁ
WLAN rz04 >	WDB191108D026 已保存,加密(不可上网)	<b></b>
★ 蓝牙 已关闭 >	WDB191108D018 加密	<b>a</b>
11 移动网络 >	RUNKUN Medical 加密	<b></b>
<b>夕</b> 更多连接 >	HONOR V20 加密	() Th
🔎 桌面和壁纸 >	XiaoMG 加密	(i)
2 显示和亮度 >	添加其他网络	
声音和振动 >		
🦲 通知 >		
🔎 生物识别和密码 >		
😧 应用 >		

2、在界面中找到 Ramzed 的图标,双击运行软件。







3、连接成功,界面中会显示对应掌超设备的超声图像。



三、使用过程中需要注意的地方:

一、同一台掌超设备,只能被一台显示终端连接并显示,如需在另外一台显示终端上使用则需在退 出 WLAN 并重启掌超设备,否则在提示无法加入该网。

二、显示终端版本、配置较低时,则会在使用过程中会有图像不流畅问题产生,请在安装前先了解 APP 需要运行环境的最低配置。